




## Hyaluronsäure mit verzögerter Freisetzung

MenoRelax® enthält natürliche Filmbildner (Pullulan und Xanthan-Gummi), die das Vaginal-epithel mit einer dünnen Schicht auskleiden. Die Hyaluronsäure ist zwischen diese Bio-Adhäsive gleichmäßig eingearbeitet. Mit der Zeit lösen sich die Filmbildner langsam auf und setzen kontinuierlich Hyaluronsäure frei.

Dadurch hält der feuchtigkeitsspendende Effekt der Hyaluronsäure bis zu 5-mal länger als in herkömmlichen Formulierungen an.

### Hyaluronic Acid Slow Release Overview

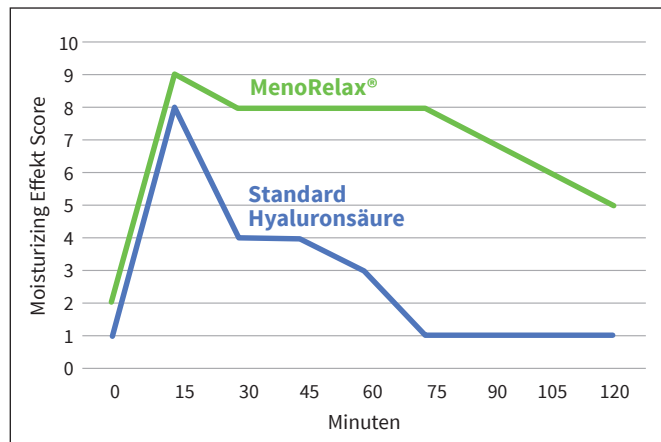

Internal Data, TheOTCLab



Lindert vaginale Trockenheit

Spendet Feuchtigkeit und Gleitfähigkeit

Lang anhaltende Wirkung

Natürlich und wirksam

Frei von Hormonen und Konservierungsmitteln

Frei von Östrogen

### HAUPTINHALTSSTOFFE VON MENO RELAX®


- Hyaluronsäure
- Pullulan, Xanthan-Gummi
- Glycerin
- Betain

## pH-Wert optimiert für die Menopause

Während der Menopause steigt der vaginale pH-Wert deutlich an. Liegt er bei Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 3,5 – 4,0, so pendelt er sich nach Abschluss der Menopause bei 7,0 ein.

MenoRelax® weist mit seinem pH-Wert von 4,5 – 5,2 einen höheren pH-Wert als andere Vaginalgele auf und ist dadurch auf die Bedürfnisse des Vaginalepithels in und nach der Menopause abgestimmt.

### Der vaginale pH-Wert ändert sich

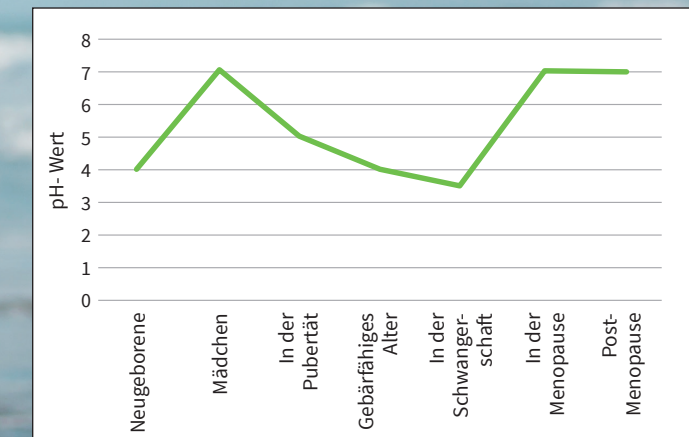

### PRO ANWENDUNG REICHT EINE MENGE VON 1 ML MENO RELAX® GEL

Diese Menge bedeckt die Fingerspitze.



### EXTERNE ANWENDUNG OHNE APPLIKATOR:

Eine kleine Menge Gel auf den Zeigefinger drücken (1 ml Gel bedeckt die Fingerspitze) und mit dem Finger auf die Vaginalöffnung und die umliegenden Areale auftragen.

### INTERNE ANWENDUNG MIT APPLIKATOR:

Applikator auf die Tube schrauben. Tube leicht drücken, bis etwas Gel an der Applikatoröffnung erscheint. Applikator in die Vagina einführen und Tube leicht drücken.

MenoRelax® ist ein EU Medizinprodukt der Klasse IIa.