




**PELPHARMA**

Ein österreichisches Pharmaunternehmen

# Stratamed®

Moderne filmbildende Wundauflage

Stratamed schafft ein optimales Umfeld  
für den Heilungsprozess der Haut

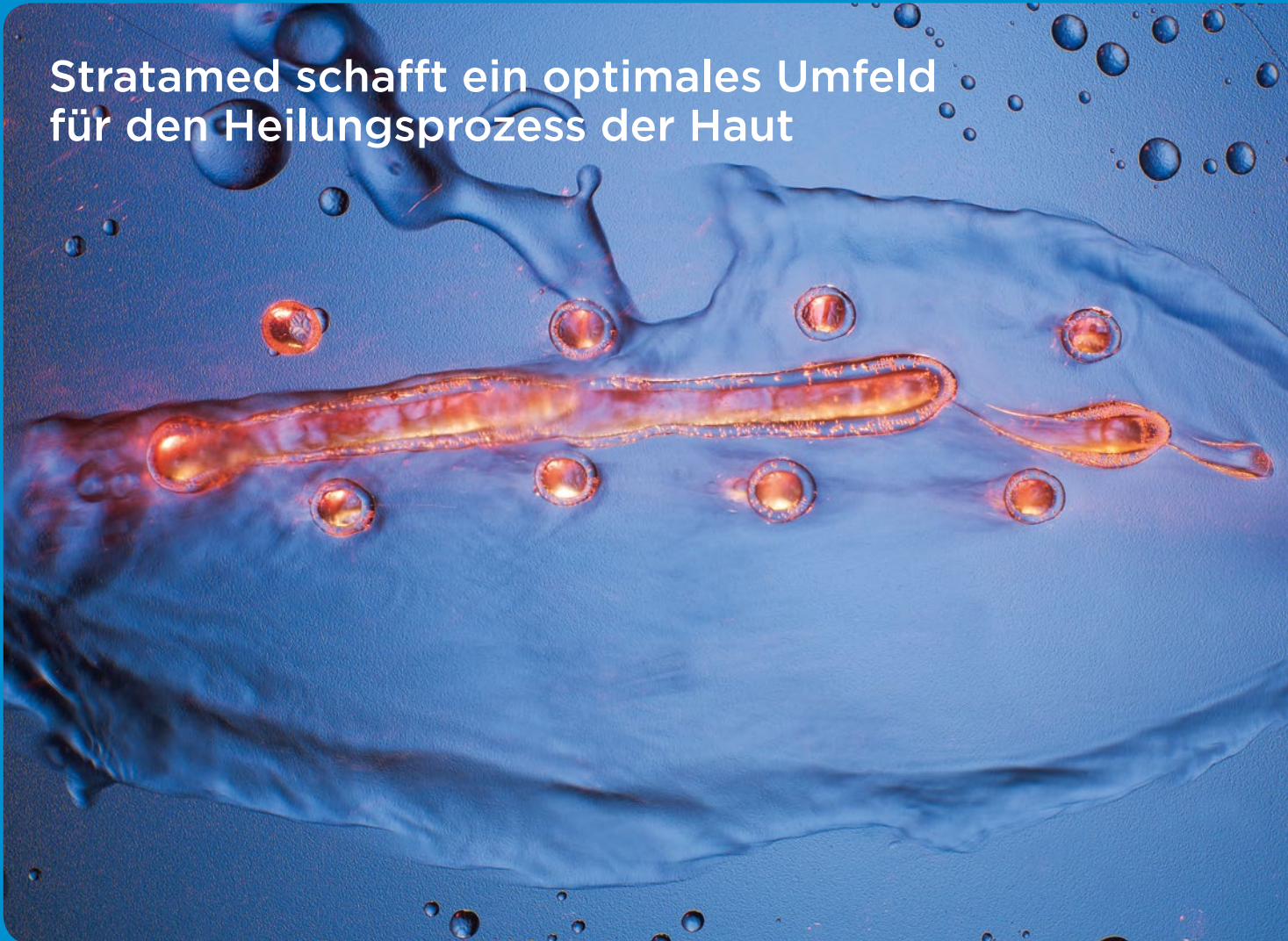

Die erste filmbildende, auf Silikongel basierende  
Wundauflage, die für die Verwendung bei offenen  
Wunden und gereizter Haut zugelassen ist.



Medizinisches Produkt der Klasse IIa,  
FDA-gelistet/TGA-zugelassen

## Wundheilungsförderung nach ästhetischen Eingriffen Prophylaxe von hypertrophen Narben und Keloiden

Patienten, die sich für Hautverjüngung und Resurfacing-Behandlungen interessieren, haben hohe Erwartungen. Sie möchten schnelle und optimale Behandlungsergebnisse erzielen. Das bedeutet, dass die Heilungsphase verkürzt werden muss, damit die Patienten ihren Alltag so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

Neben der richtigen Behandlung und Technik ist die Pflege nach dem Eingriff von entscheidender Bedeutung, um optimale Ergebnisse, eine hohe Patientenzufriedenheit und eine kurze Ausfallzeit zu erzielen.

### Stratamed sofort nach der Behandlung anwenden


**Stratamed Silikongel ist eine flexible Vollkontakt-Wundauflage.**

Es ist die erste semiokklusive, selbsttrocknende, transparente Silikonwundauflage in Form eines Gels, das auf die gereizte und nicht-epithelisierte Haut aufgetragen werden kann.

Stratamed bildet eine optimale Umgebung für den Heilungsprozess der Haut und unterstützt damit die Bildung einer normalen Narbe.



Kombinationstherapie mit Thermage (Radiowellenbestrahlung) und fraktionalem CO<sub>2</sub> Laser

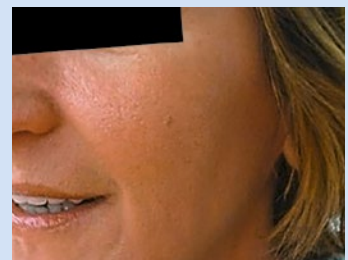

Hautzustand nach 7 Tagen Stratamed

*„Der Stratamed Schutzfilm verbindet sich optimal mit der Haut und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Wirkung. Es bildet sich damit eine optimale Umgebung für den Heilungsprozess der Haut, was zu einer schnelleren Epithelbildung führt.“<sup>1</sup>*

- Bakteriostatisch, gasdurchlässig und reaktionsträge<sup>1,2</sup>
- Bildet eine optimale Umgebung für eine schnellere Reepithelisierung<sup>1</sup>
- Vermindert und normalisiert die Entzündungsreaktion<sup>1</sup>
- Spendet Feuchtigkeit und schützt oberflächliche Wunden und gereizte Haut<sup>1</sup>
- Haftet nicht stark am Wundbett oder am neu gebildeten Granulationsgewebe<sup>2</sup>
- Lindert Symptome (Rötung/ Verfärbung, Juckreiz, Beschwerden, Schmerzen)<sup>1</sup>
- Verbessert das sichtbare Ergebnis der Behandlung<sup>1</sup>
- Einfach anzuwenden, mit hervorragendem Sicherheitsprofil<sup>1</sup>

**Stratamed kann sofort nach allen dermatologischen Behandlungen eingesetzt werden, z. B.: Laserbehandlung oder Kryotherapie, Dermabrasion, chemisches Peeling, Entfernung von Tätowierungen, Narbenrevision.**



## Klinisch bewährte Wirksamkeit und einfache Anwendung<sup>1-3</sup>



Vor der Behandlung



Während der Behandlung



Tag 10 nach der Behandlung

### Laserbehandlung von Falten<sup>1</sup>

Vor, während und 10 Tage nach der Behandlung mit Stratamed in Kombination mit Thermage (Radiowellenbestrahlung), mit fraktioniertem CO<sup>2</sup>-Laser und Botox.



Während der Behandlung



Nach Ende der Behandlung



Woche 4 nach der Behandlung

### Dermabrasion<sup>1</sup>

Während und 4 Wochen nach der Behandlung mit Stratamed (Monotherapie).



4 Monate nach der Operation



Tag 7 nach der Behandlung

### Schnelle Heilung einer chronischen Wunde nach einer Operation aufgrund eines Plattenepithelkarzinoms<sup>2</sup>


Nicht heilende Wunde (4 Monate nach Operation) und 7 Tage nach der Behandlung mit Stratamed (Monotherapie).

Stratamed **beschleunigt** den Wundheilungsprozess und verkürzt somit die Ausfallzeit.<sup>3</sup> Stratamed **verbessert** das sichtbare Ergebnis der Behandlung.<sup>3</sup>


**Nach dermatologischer Behandlung, im Halbseitenvergleich mit Stratamed als Monotherapie (linkes Bild) und Thermalwasser + weißer Vaseline (rechtes Bild).**

Stratamed als Monotherapie

Thermalwasser + weiße Vaseline

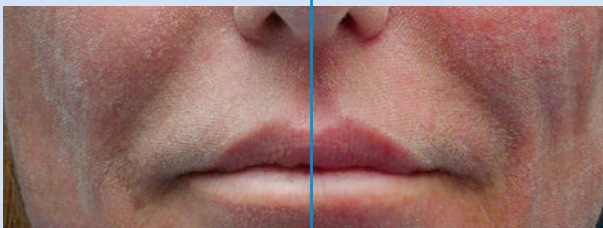


Sofort nach dem Verfahren

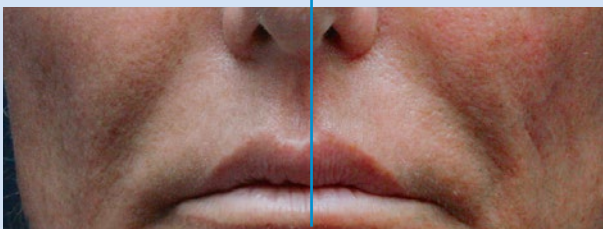

15 Minuten nach Anlegen der primären Wundauflage

Akutes Erythem, gemessen anhand des veränderten Hämoglobinwerts 15 Minuten nach der Anwendung

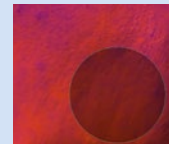

+1%

Thermalwasser + weiße Vaseline

Stratamed als Monotherapie

-31%

Antera 3D-Messung

Stratamed verringert bereits nach 15 Minuten das brennende Gefühl in den entzündeten Arealen, verkleinert das Erythem und senkt die oberflächliche Hauttemperatur.<sup>3</sup>

Stratamed sorgt für eine überlegene Pflege nach der Behandlung und verbessert die Therapietreue.<sup>3</sup>

# Stratamed®

Stratamed ist erhältlich in Tuben mit 5 g, 10 g und 50 g.




## Gebrauchsanweisung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte sich Stratamed im ständigen Kontakt mit der Haut befinden (24 Stunden pro Tag/7 Tage die Woche). Wenn es richtig auf den behandelten Bereich aufgetragen wird, sollte Stratamed innerhalb von 5–6 Minuten trocknen. Wenn der Trocknungsprozess länger dauert, haben Sie womöglich zu viel aufgetragen. Entfernen Sie vorsichtig überschüssige Mengen mit einem sauberen Tuch oder Mull und warten Sie, bis der Trocknungsvorgang abgeschlossen ist.

- Die betroffene Haut oder Wunde muss sauber sein.
- Tupfen Sie überschüssige Exsudate oder Flüssigkeiten, die aus der Wunde austreten, so gut wie möglich trocken, bevor Sie das Gel auftragen.


### Nach der Hautverjüngung und nach dem Resurfacing:

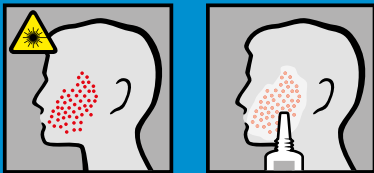

Auf geschädigter oder verletzter Haut, die keine sekundäre Schutzauflage benötigt:

Tragen Sie eine sehr dünne Schicht Stratamed auf den betroffenen Bereich auf und lassen Sie das Gel trocknen. Stratamed sollte 1x täglich angewendet werden. Sollte die Wunde allerdings an einer stark beanspruchten Stelle liegen, empfehlen wir Stratamed 2x täglich aufzutragen. Nach dem Trocknen von Stratamed können Sonnenmilch, Kosmetika, Druck- oder Gipsverbände verwendet werden.

### Nach operativen Inzisionen/Exzisionen:

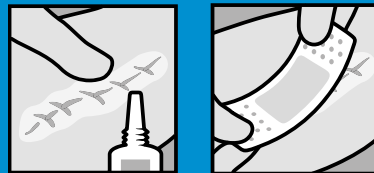

Auf geschädigter oder verletzter Haut, die eine sekundäre Schutzauflage benötigt:

Tragen Sie eine dünne Schicht Stratamed auf und decken Sie diese mit der Sekundär-auflage ab. Das Trocknen ist nicht erforderlich. Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, sollte Stratamed bei Verbandswechsel oder Kontrolle der Wundheilung erneut aufgetragen werden.

### Hersteller:

Stratapharma AG, CH-4051 Basel, Schweiz  
www.stratamed.com

### Weitere Produkte:

### Referenzen:

1. Sandhofer M, Schauer P. SKINmed 2012;10:S1-S7
2. Monk EC, Benedetto EA, Benedetto AV. Dermatologic Surgery 2014;40:76-79
3. Data on file, Stratapharma AG; Dr. Sandhofer, Linz 2010

# Strataderm®

Gel zur Behandlung von Narben

Für die Vorbeugung und Behandlung von abnormen Narben. Zur äußerlichen Anwendung auf alten und neuen Narben. Weicht erhabene Narben auf und glättet sie. **Strataderm®** basiert auf Silikonverbindungen ohne SiO<sub>2</sub> (Sand oder Glas). Daher trocknet das Gel besonders schnell und haftet sehr gut auf der Haut.



### Vertrieb in Österreich:



**PELPHARMA**  
Ein österreichisches Pharmaunternehmen

Pelpharma Handels GmbH  
Wohndorfweg 36  
A-3001 Tulbingerkogel

[www.pelpharma.at](http://www.pelpharma.at)